

Restylane

BT™

ZWEI INNOVATIVE
TECHNOLOGIEN FÜR
EIN UMFASSENDES
FILLER-PORTFOLIO

NASHA™

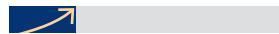
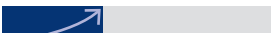
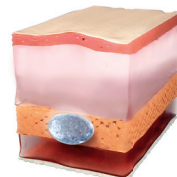
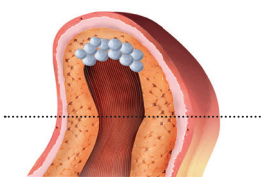


EIN PRODUKT DER GALDERMA
AESTHETICS KOLLEKTION

 GALDERMA

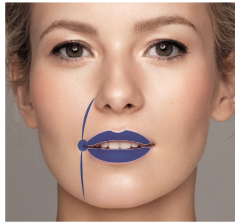
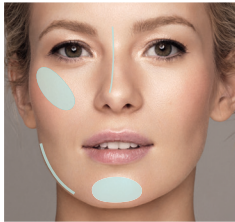
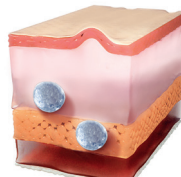
BT™

BT™

						
	Restylane® Fynesse™, 1 ml	Restylane® Refyne™, 1 ml		Restylane® Volyme™, 1 ml	Restylane® Kysse™, 1 ml	Restylane® Defyne™, 1 ml
Inhaltsstoffe	20 mg/ml HA ohne Lidocain	20 mg/ml HA mit 0,3% Lidocain		20 mg/ml HA mit 0,3% Lidocain	20 mg/ml HA mit 0,3% Lidocain	20 mg/ml HA mit 0,3% Lidocain
Hebekapazität						
Geltextur	Sehr weich	Weich		Moderat weich	Moderat weich	Moderat fest
Produktintegration	Breiter	Breiter		Breiter	Breiter	Breiter
Gewebeabdeckung	Weniger erforderlich	Weniger erforderlich		Weniger erforderlich	Weniger erforderlich	Weniger erforderlich
Behandlungsareale						
	Periorbital- und Perioralbereich	Nasolabial- und Marionettenfalten, Tränen-Wangen-Lid-Furche		Schläfen und Volumenverlust	Lippenvolumen und -kontur	Jochbeinregion, Kinn, Unterkieferkontur
Injektionstiefe						
	Oberflächliche Dermis	Mittlere Dermis		Subkutan bis supraperiostal	Lippenrot, Submukosa	Tiefe Dermis oder oberflächliche Subkutis
Empfohlene Nadel	30 G 1/2" (UTWN)	30 G 1/2" (UTWN)		27 G 1/2" (UTWN)	30 G 1/2" (UTWN)	27 G 1/2" (UTWN)
Empfohlene Mikrokanüle	Steriglide (TSK) 30 G	Steriglide (TSK) 27 G		Steriglide (TSK) 27 G	Steriglide (TSK) 25 G und 27 G	Steriglide (TSK) 27 G
Wirkdauer	Bis zu 6 Monate ^{1,*}	Bis zu 12 Monate ²		Bis zu 18 Monate ^{2,*}	Bis zu 12 Monate ^{3,4,*}	Bis zu 12 Monate ^{5,*}

NASHA™

NASHA™

					
	Restylane®, 0,5 ml und 1 ml	Restylane® Lyft™, 1 ml	Spritze mit SmartClick™ System		
	20 mg/ml HA mit oder ohne 0,3% Lidocain	20 mg/ml HA mit oder ohne 0,3% Lidocain	20 mg/ml HA mit oder ohne 0,3% Lidocain	12 mg/ml HA mit 0,3% Lidocain	Inhaltsstoffe
			Steigerung der Hautelastizität und -hydratation sowie Reduktion feiner Linien		Hebekapazität/ Wirkung
	Fest	Fest	Sehr weich	Sehr weich	Geltextur
	Punktuell	Punktuell	Breiter	Breiter	Produktintegration
	Mehr erforderlich	Mehr erforderlich	Mehr erforderlich	Weniger erforderlich	Gewebeabdeckung
					Behandlungsareale
	Nasolabial- und Marionettenfalten, orale Kommissur	Jochbeinregion, Kinn, Unterkieferkontur	Verbesserung der Hautqualität von Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen		
					Injektionstiefe
	Mittlere Dermis	Tiefe Dermis oder oberflächliche Subkutis	Subkutan		
	29 G 1/2" (UTWN)	29 G 1/2" (UTWN)	29 G TWN		Empfohlene Nadel
	Pix'L 27 G	Pix'L 23 G und Pix'L 25 G	Pix'L 23 G, 50 mm und Pix'L 25 G, 40 mm		Empfohlene Kanüle
	Bis zu 12 Monate ^{6,*}	Bis zu 12 Monate ^{5,*}	Bis zu 12 Monate ^{7,*}	Bis zu 9 Monate ^{8,*}	Wirkdauer

* Mit einer Behandlung.

¹ Rzany B et al. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. *Dermatol Surg.* 2012 Jul; 38(7 Pt2): 1153–61. ² Talarico S et al. High Patient Satisfaction of a Hyaluronic Acid Filler Producing Enduring Full-Facial Volume Restoration: An 18-Month Open Multicenter Study. *Dermatol Surg.* 2015 Dec; 41(12): 1361–69. ³ Poster: A randomised comparative study of the safety and efficacy of lip injections with Emervel Lips & Juvéderm Volbella, Hilton et al.; präsentiert auf der IMCAS Paris 2016. ⁴ Cartier H et al. Perioral rejuvenation with a range of customized hyaluronic acid fillers: efficacy and safety over six months with a specific focus on the lips. *J Drugs Dermatol.* 2012 Jan; 11(1 Suppl): 17–26. ⁵ Ascher B et al. Efficacy and safety of a new hyaluronic acid dermal filler in the treatment of severe nasolabial lines – 6-month interim results of a randomized, evaluator-blinded, intra-individual comparison study. *J Cosmet Dermatol.* 2011 Jun; 10(2): 94–8; Data on file. ⁶ Narins RS et al. 12-Month controlled study in the United States of the safety and efficacy of a permanent 2.5% polyacrylamide hydrogel soft-tissue filler. *Dermatol Surg.* 2010 Nov; 36 Suppl 3: 1819–29. ⁷ Gubanova EI et al. 12-month effects of stabilized hyaluronic acid gel compared with saline for rejuvenation of aging hands. *J Drugs Dermatol.* 2015 Mar; 14(3): 288–98. ⁸ Streker M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin for skin rejuvenation: face, hand, and décolletage. *J Drugs Dermatol.* 2013 Sep; 12(9): 990–4.

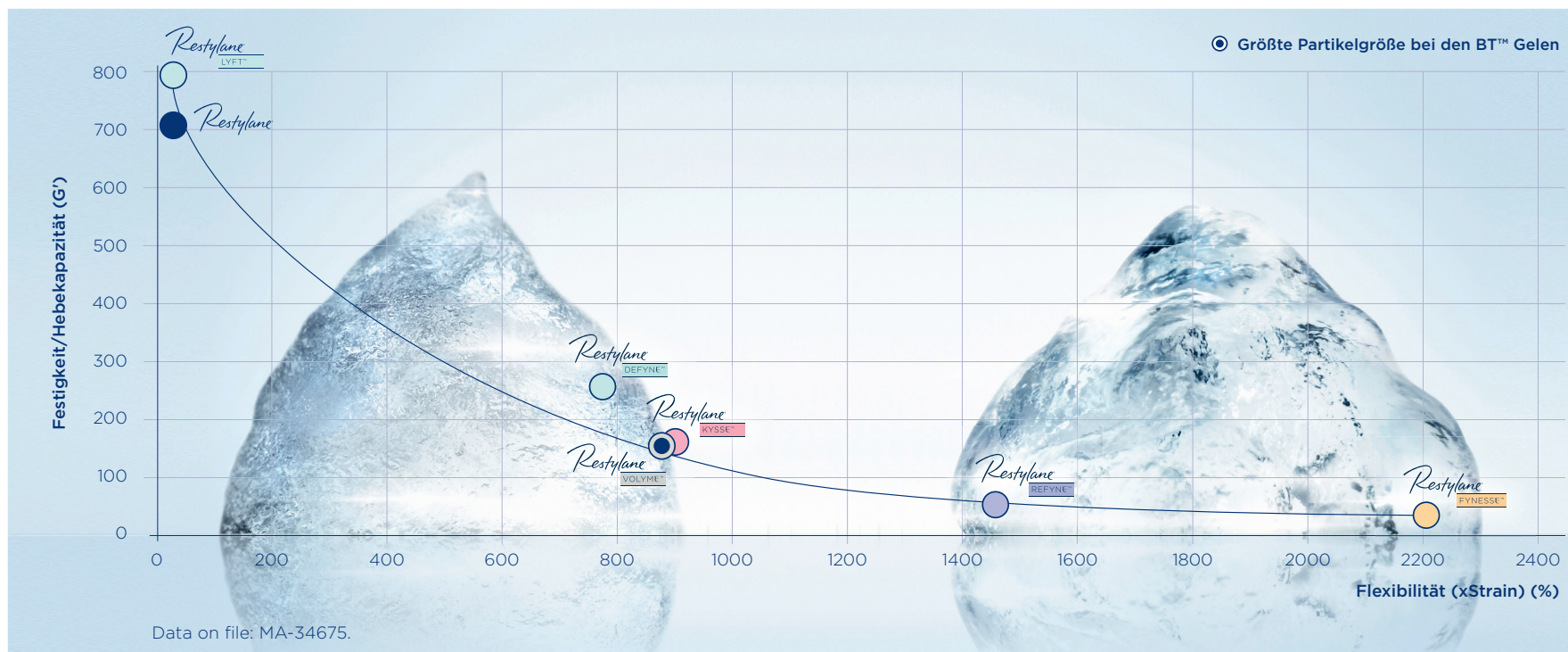
Behandlungsprotokoll für Restylane® Skinboosters™
2–3 Aufbaubehandlungen im Abstand von 4 Wochen, Auffrischungsbehandlung im Monat 9–12
Nach der ersten von insgesamt 3 erfolgten Aufbaubehandlungen.

DIE NASHA™ TECHNOLOGIE

Die festeren NASHA™ Gele* mit geringer Flexibilität (xStrain) und höherer Hebekapazität (G') bieten mehr Unterstützung für Lifting sowie Präzision.^{1,2}

DIE BT™ TECHNOLOGIE

Die weicheren BT™ Gele** weisen eine höhere Flexibilität (xStrain) und eine geringere Hebekapazität (G') auf.³⁻⁶



QR-Code scannen
und Video zur
Geltechnologie
sehen.

Quellen:

- ¹ Weiss RA et al. Dermatol Surg. 2016; 42: 699-709.
- ² Narins RS et al. Dermatol Surg. 2011; 37: 644-50.
- ³ Data on file: MA-33939.
- ⁴ Philipp-Dormston et al. Dermatol Surg. 2018; 44: 826-32.
- ⁵ Segura S et al. J Drugs Dermatol. 2012; 11(1 Suppl): 5-8.
- ⁶ Öhrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Poster presented at AMWC 2019.

* NASHA™ Gele: Restylane® und Restylane® Lyft™.

** BT™ Gele: Restylane® Volyme™, Restylane® Defyne™, Restylane® Kysse™, Restylane® Refyne™ und Restylane® Fynesse™.

KONTAKT

Galderma Laboratorium GmbH
Toulouser Allee 23a
40211 Düsseldorf
Germany

Hotline Deutschland +49 800 5888850

www.galderma.de



Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ohne vorherige Genehmigung durch Galderma weder vervielfältigt, verbreitet, bearbeitet noch umgestaltet werden. Bei einem Verstoß behält sich Galderma das Recht zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor.